



hygienicDES FORTE

Ytdesinfektion



Produktnamn: hygienicDES FORTE
Produktområde: Desinfektion

Produktbeskrivning:

Klar att använda, alkoholhaltig snabb desinfektion för alla alkoholresistenta ytor. VAH/ÖGHMP. Parfymfri. pH-värde neutralt.

Förpackningsenheter:

6 x 0,9 kg Art.-Nr. 4460100808

pH-värde
neutral

Användningsområde:

För snabb desinfektion även under arbetsprocessen, t.ex. i kök, sanitetsanläggningar, vårdhem, läkarmottagningar. Speciellt för otillgängliga områden såväl som på alla områden där snabb effektivitet mot bakterier är nödvändig.

Dosering:

Applicera utspädd, över hela området, sprid med en engångsduk och låt torka. Ingen sköljning med vatten behövs. Används lokalt.

Doseringstabell
hygienicDES FORTE:

Tester enligt VAH / ÖGHMP / RKI / DVV			
Teststandard	Exponeringstid	Dosering	Last
VAH / ÖGHMP bakteriedödande / levurocidal	5 Min.	100 %	Hög
RKI / DVV begränsad virucid (höljeförsedda virus)	30 Sek.	100 %	Låg





Desinfektion

hygienicDES FORTE

Ytdesinfektion

Kompletterande tester enligt EN			
Teststandard	Exponeringstid	Dosering	Last
EN 13727 bakteriedödande medel	1 Min.	100 %	Hög
EN 13624 Lecuricidal	1 Min.	100 %	Hög
EN 14348 Tuberkulos	30 Sek.	100 %	Låg
EN 14476 (norovirus, MNV)	1 Min.	100 %	-
EN 14476 (rotavirus)	30 Sek.	100 %	-
EN 14476 (adenovirus)	3 Min.	100 %	Låg
Desinfektion med hup DRY våtservetter (EN 16615, 4-fältstest)	1 Min.	100 %	Hög

Säkerhetsinformation:

De vanliga skyddsåtgärderna vid hantering av kemikalier måste följas. Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid produktetiketten före användning. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Håll behållarna tätt stängda. Håll dig borta från antändningskällor. Första hjälpen: Ge frisk luft efter inandning.

Förvaring:

Förvara stängt och torrt vid rumstemperatur av kvalitetsskäl.

Produktrekommendation:

För alkoholkänsliga ytor rekommenderar vi hygienicPLUS.

Desinfektion

hygienicDES FORTE
Ytdesinfektion

Försäljningsenhet:
Styck

Euro pall:
342 Styck