



Desinfektion

hygienicDES PERFECT

Desinfektionsmedel



Produktnamn: hygienicDES PERFECT
Produktområde: Desinfektionsmedel

Produktbeskrivning:

Flytande desinfektionsmedelkoncentrat för rengöring och desinfektion av icke-invasiva medicinska produkter, medicinskt inventarier och ytor med höga hygienkrav. Medlet är utmärkt för livsmedelsområdet eftersom det är fritt från parfym och kvartära ammoniumföreningar (QAV). Tack vare sin goda rengöringsförmåga och desinfektion är det också perfekt för offentliga institutioner och hotell. Dessutom är det behagligt att använda, eftersom det inte innehåller aldehyder, fenoler eller alkoholer.

Förpackningsenheter:

10 kg dunk

Art.-Nr. 4460101511

pH-värde:

alkalisk

Användningsområde:

Tack vare den korta verkningstiden och låga doseringen kan produkten användas i många områden med höga hygienkrav. Den utspädda lösningen av hygienicDES PERFECT ska appliceras jämnt på ytan som ska rengöras och hållas fuktig under hela verkningstiden. Efter användning i livsmedelsområdet ska ytan noggrant sköljas med vatten! De behandlade ytorna kan användas direkt efter att de har torkat.

Användningsområde enligt medicintekniska förordningen: Rengöring och ytdesinfektion av icke-invasiva medicinska produkter.

Användningsområde enligt biocidproduktförordningen: Ytdesinfektionsmedel med utmärkt rengöringsförmåga. BAuA nr. N-68713


UDI-DI

00: UDI-DI 09008353114253

14: UDI-DI 09008353114260

55: UDI-DI 09008353114277

73: UDI-DI 09008353114284

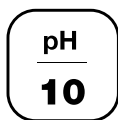



Desinfektion

hygienicDES PERFECT

Desinfektionsmedel

Dosering:

För speciella mikrobiella belastningar, se doseringstabellen i produktdatabladet. Vid felaktig dosering (underdosering) kan produktens verkan kraftigt påverkas eller helt utebli. Produkten får inte användas efter utgångsdatum. Användningslösningen får endast användas en gång och måste beredas på nytt varje dag.

Materialkompatibilitet

Inte lämplig för användning på obehandlat trä, aluminium och akrylglas. Vid polymerbelagda eller linoleummattor bör produkten testas på en mindre synlig plats först, eftersom det kan uppstå reaktioner beroende på användningskoncentrationen.

Verksamt ämne

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Doseringstabell

Verkspektrum

VAH		5%	5 min ¹ 2
ÖGHMP		1%	15 min ¹ 2
Ytdesinfektion med mekanik: bakteriedödande, jästdödande	EN 13624 EN 13727 EN 16615	1%	5 min ¹ 1
Ytdesinfektion utan mekanik: bakteriedödande, jästdödande	EN 13624 EN 13697 EN 13727	1%	5 min ¹ 1
mykobakteriedödande	EN 14348	10%	60 min ¹ 1
Begränsat virusdödande (MVA)	EN 14476	3%	5 min ¹ 2
Influenza A-virus (H1N1)	EN 14476	1%	15 min ¹ 2



hygienicDES PERFECT
Desinfektionsmedel

	EN 14476	2%	15 min ²
-IQ!	EN 14476	1%	5 min ²
@ZY % /%))Z	EN 1276 EN 13697	1%	5 min ²
-))Z)%	EN 1650 EN 13697	1%	5 min ²
@ZY % /%))Z	DVG	1%	5 min ³
-))Z)%	DVG	4%	5 min ³

*RüÖ Z YZü /ü° Öü@% Z / Öü/ " ü" %)/(Yü /' - ü (ü
 *düÖ Z YZü /ü° Öü@% Z / Öü (ü /ü " %" % Z
 *vüÖ Z YZü /ü° Öü@% Z / Öü /ü " %" % Z ü (ü

Säkerhetsinformation

Crsakar`svéra`frätskaXor`dÉ`h i Xen`oWh`a``var`iga`ögonskaXor" ; iftigt för vatten`evanXe`organismer`meX`éngvarig`effekt" I ts`ädd`i`mi`ön`Vör` i nXvikas"

5nvänX`skmXXshanXskarž`skmXXsk`äXerž`ögonskmXX`oWh`ansiktsskmXX" J=8`
 ?CBH5`?H`A98`< I 89B`fe``er`hÉretl: Ha`genast`av`a``a`förorenaXe`e`er`
 genomV`öta`k`äXer" Skö`^`h i Xen`meX`vatten`e`er`X i sWha" J=8`?CBH5`?H`A98`
 x ; CB9B: Skö`^`försiktigt`meX`vatten`i`nÉgra`min`i`ter" Ha`Vort`event`i`e`a`
 kontakt`inser`om`mö`igt" Fortsätt`att`skö`^`a" Fing`omeXe`Vart`
 ; -FH-BFCFA5H-CBSN9BHF5@9B`e`er`ä`kare" 5vfa``oWh`fördaWkning`ska`
 hanteras`en`igt``oka`a`oWh`natione``a`avfa``shanteringsföreskrifter"=-nehÉ`er`B!
 fl`!aminodrodml`!B!XoXeWm`drodan!%ž`!Xiamin`fl75S: `&`+&! , &!-l`+ž) `g#%\$\$`g"

Förvaring:

**FekommenXeraX`agringstemderat`i`r: \$É`(\$`š7" <É``VehÉ`aren`stängX" Förvara`
 Varnsäkert" 9vent`i`e`a`färgföränXringar`dÉ`verkar`inte`kva`iteten`oWh`verkan"**



Desinfektion

hygienicDES PERFECT

Desinfektionsmittel

Produktempfehlung

hygienicDES PERFECT ist kompatibel mit dem hup DRY System zur Herstellung von Einwegtüchern. Für eine genauere Dosierung wird die Verwendung der Hagleitner dosierHILFE (Art. Nr.: 4450700200) empfohlen.

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. **Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen.** Kindersicher aufbewahren.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern. Kindersicher aufbewahren.

BAuA Reg.-Nr.

N-68713

Verkaufseinheit

Kanister

Europalette

60 Kanister

Rev. No. 05 / 22.03.2023