

Desinfektion

hygienicDES PLUS

Yt- och snabbdesinfektion

**Produktnamn:**

hygienicDES PLUS

Produktområde:

Desinfektion

Produktbeskrivning

Bruksfärdigt, alkoholfritt preparat för rengöring och desinfektion av känsliga ytor. Särskilt lämpligt för alkoholömtåliga ytor, såsom plexiglas. Lämnar en lätt apelsindoft. Fritt från alkoholer, aldehyder och fenoler. Listat av ÖGHMP och VAH.

Förpackningseinhet

6 x 1 kg systemflaska

Art.-Nr. 4460101808

pH-värde

neutral

Användningsområde

Biocidförordning: Ytdesinfektionsmedel som är idealiskt för rengörande desinfektion av ytor med direkt och frekvent hudkontakt, såsom solarium, ångbastu, massagebänkar samt träningsutrustning.

EU:s förordning om medicintekniska produkter: För rengöring och ytdesinfektion av icke-invasiva medicintekniska produkter. Detta inkluderar patientnära ytor med hudkontakt i klinik och praktik, såsom undersökningsbänkar. Även operationslampor, ledstänger och kontrollpaneler på utrustning efter en behandling omfattas.

Användning: Produkten kan appliceras direkt på ytan som ska desinficeras eller med en återanvändbar skum- eller spraypistol. För desinficering av vertikala ytor eller tangentbord rekommenderas att produkten först appliceras på en trasa.

UDI-DI

00: UDI-DI 09008353219781

14: UDI-DI 09008353230496

55: UDI-DI 09008353219903

73: UDI-DI 09008353230502

Aktivitetsspektrum

VAH/ÖGHMP	-	1 Min. *
Ytdesinfektion med mekanisk verkan: bakteriedödande, jästdödande.	EN 13624, EN 13727, EN 16615	1 Min. *





Desinfektion

hygienicDES PLUS [MP]

Yt- och snabbdesinfektion

Begränsat virucid (effektiv mot höljeförsedda virus).	EN 14476	30 Sek. *
Polyomavirus SV40	EN 14476	2 Min. *
Norovirus	EN 14476	30 Min. *
Rotavirus	EN 14476	30 Sek. **
Begränsat virucid – effektivt mot höljeförsedda virus	EN 16777	1 Min. *

* Hög belastning, medicinskt område. ** Medicinskt område.

Alla tester utförs vid rumstemperatur.

Materialkompatibilitet

hygienicDES PLUS har testats för kompatibilitet med följande material: POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), Plexiglas, PVC, PE-HD (Hostalen), PA, polysulfon, linoleumbas, gummigolv, vinylgolv, stål (rostfritt). Vid användning på aluminium och icke-järnmetaller bör materialkompatibiliteten först testas på en diskret plats. Användning på polykarbonat och ABS (Novodur) rekommenderas inte. Vid användning på konstläder kan lätt färgförändring förekomma.

Säkerhetsinformation

De vanliga skyddsåtgärderna vid hantering av kemikalier ska iakttas. Använd desinfektionsmedlet säkert. Läs alltid produktinformationen innan användning. Förvara utom räckhåll för barn.

Förvaring

För kvalitets skull, förvara på en torr och sval plats vid rumstemperatur.

Produktrekommendation

För användning på skärmar rekommenderar vi hygienicDES FORTE.

BAuA Reg.-Nr.

N-108718

Försäljningsenhet:

Euro pall

Styck

342 styck

Rev. Nr. 02 / 06.05.2024